

## iconos indicadores del equipo y advertencias

En el presente tutorial se presentarán, a los usuarios, algunos de los diferentes iconos indicadores del equipo Gastrolyzer. Además se detallarán dos advertencias a tener en cuenta a la hora de utilizar el equipo.

ICONOS	DESCRIPCIÓN
	Este icono se presenta durante la inicialización del equipo, y significa que es necesario realizar la calibración del equipo. De no hacerse la misma el equipo podría dar lecturas falsas. Para la calibración se deberá enviar el equipo a nuestras oficinas. (Ver final del tutorial).
	La presentación de este icono se da durante la inicialización, y significa que es preciso cambiar la pieza D. Esto se indicará cada 28 días. También será necesario el cambio de la pieza D si la misma está visiblemente sucia o contaminada.
	Este icono es el indicador de la carga de las pilas. Cuando el mismo se encuentre pintado de rojo, las pilas deben ser reemplazadas.
	Icono de ajuste. Desde el mismo se podrá acceder a las siguientes opciones (que trataremos en próximos tutoriales): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuste del cronómetro de retención de respiración.</li> <li>- Fijar fecha / hora.</li> <li>- Pantalla de información del sistema.</li> <li>- Cero / Calibración.</li> <li>- Activación / Desactivación del sonido.</li> </ul>
	Icono para regresar al menú principal.
	Icono para regresar al menú anterior.

## ADVERTENCIAS

### *Sobre la limpieza del equipo.*

Nunca utilice alcohol ni agentes de limpieza que contengan alcohol u otros solventes orgánicos, ya que estos vapores dañan el sensor de hidrógeno que se encuentra en el interior del equipo.

### *Sobre las boquillas.*

Las boquillas de cartón son de un solo uso, ya que el reutilizarlas puede aumentar el riesgo de que se produzcan infecciones cruzadas.

### DATOS DE ENVÍO PARA LA CALIBRACIÓN:

Santos Dumont 3454 Piso 4º Oficina 6 (C1427EIB) CABA

Tel: (+54) (11) 4 555 0482 / (+54) (11) 4 554 3224

### Cualquier duda le solicitamos ponerse en contacto con:

Bioing. Pablo ALONSO. Teléfono Móvil 15 3592 6409. ✉ [palonso@gastrotex.com.ar](mailto:palonso@gastrotex.com.ar)